


さらさらスリム

さらさらスリムは吸収量を増やす目的の補助パッドです。尿は一部補助パッドに吸収し、一部は併用しているパッドに吸収されます。すき間漏れ対策などに役立ちます。

① 吸収量をふやす


パッドの上に重ねて使います。
股の部分を折り返しましょう。

※さらさらミニの場合は股の部分の折り返し不要です。

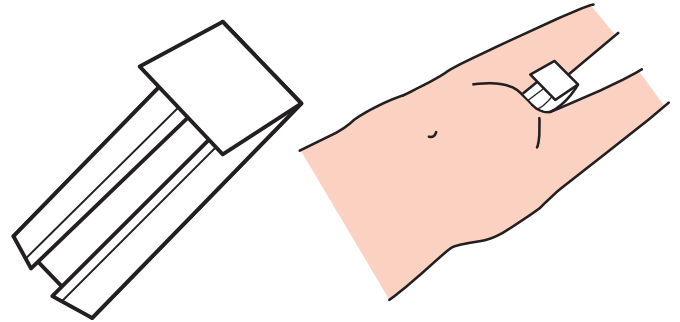


② 女性 伝いモレ防止

じゃばら折りをし股にあてます。

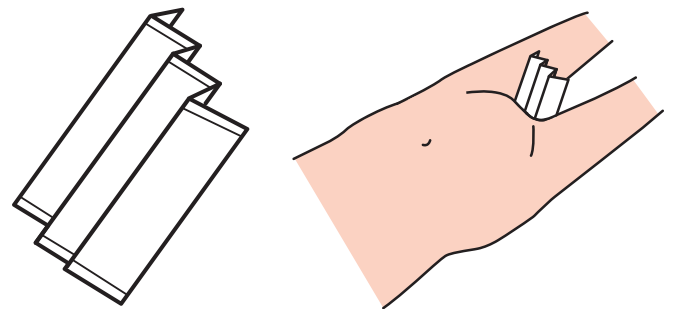


③ 男性 伝いモレ防止

両側から丸めて陰茎をはさみます。
すき間の出来やすい方に有効です。

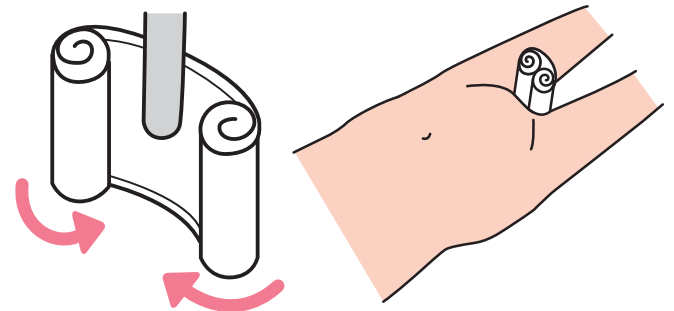

④ 男性 伝いモレ防止

パッドをくるっと丸めコップ状にします。
○を矢印方向へ入れましょう。
巻ける方に有効です。

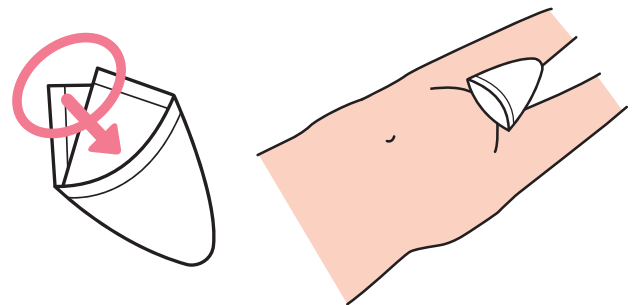

⑤ 便の背もれ対策

三つ折りにしたさらさらスリムを
おむつの背部分のギャザー内に入れます。

※さらさらミニの場合は二つ折りでご対応ください。

